

**UROGENITÁLNÍ MYKOPLAZMATA****MYCOPLASMA HOMINIS A UREAPLASMA UREALYTICUM**

---

**ODBĚR VZORKU**

Mykoplazmata pevně adherují k povrchu epiteliálních buněk. Proto je nutný takový odběr, aby vzorek zaslaný k vyšetření tyto buňky sliznice obsahoval.

**U ŽENY** se odebírá vzorek **Z CERVIXU**, resp. **Z VAGINY**:

1. Před odběrem z endocervixu očistěte zevní ústí děložního hrdla od hlenu, hnisu, krve apod. (tento tampon není součástí odběrové soupravy).
2. Speciální tampon z odběrové soupravy (dacron nebo rayon) zaveďte cca 1cm do cervikálního kanálu a několikrát tamponem otočte k získání bohatého vzorku. **U gravidních žen** lze vzorek odebrat z exocervixu, resp. z vaginy.
3. Tampon s odebraným materiálem vložte do nádobky s UMMt médiem. Přečnívající část tamponu odlomte a nádobku pevně uzavřete.

**U MUŽE** se odebírá vzorek **Z URETRY**:

1. Pacienta poučte, že by minimálně 2-3 hod před odběrem neměl močit.
2. Očistěte ústí močové trubice od sekretů, je-li třeba (tento tampon není součástí odběrové soupravy).
3. Speciální tampon z odběrové soupravy (dacron nebo rayon) zaveďte 2cm do uretry a několikrát tamponem otočte tak, aby se získaly požadované slizniční buňky.
4. Tampon s odebraným materiálem vložte do nádobky s UMMt médiem, přečnívající část tamponu odlomte a nádobku pevně uzavřete.

Na vyšetření lze použít i tekutý materiál: sperma nebo moč (první porce) odebraný do sterilní nádobky (spíše se však nedoporučuje pro možnost falešné reaktivity vlivem zásaditého pH).

**UCHOVÁVÁNÍ VZORKU PŘED TRANSPORTEM, TRANSPORT**

Vzorek bez UMMt média co nejrychleji po získání přepravit do laboratoře při pokojové teplotě. V případě nutnosti lze inokulované UMMt médium uchovávat až 48 hodin při 2-8°C.