

Spolupracující laboratoř: **HAD (Unilabs Hadovka biochemie + hematologie), BUD (Unilabs Budějovická biochemie + hematologie), HAD imunologie, HAD mikrobiologie**  
**Unilabs imunologie Ostrava, Unilabs mikrobiologie Ostrava, Unilabs Louny, Unilabs genetika Brno**

žádanka první strana

Číslo metody	LAB	Zkratka	Analyt	Typ odběrové nádoby	Materiál	Podmínky transportu před separací	Stabilita po separaci (stabilita moči)		
							20 °C	4-8 °C	--20 °C
			<b>LEDVINOVÝ SOUBOR (krev)</b>						
158	HAD		Cystatin C	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
519	BUD		Osmolalita	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru	3 h	1d	3m
			<b>IONTY (krev)</b>						
3216	BUD	Zn	Zinek	gelová zk.	sérum	separace do 1 hodiny po odběru	1t	2t	1r
3217	BUD	Cu	Měď	gelová zk.	gelová zk.	zabránit dlouhé kompresi paže	2t	2t	1r
			<b>JATERNÍ SOUBOR, ENZYMY (krev)</b>						
6037	BUD		ALP izoenzymy	gelová zk.	sérum		4h	3d	4t
496	HAD		Amyláza pankreatická	gelová zk.	sérum		1d	2t	8t
194	HAD		Lipáza	gelová zk.	sérum		1t	3t	1r
691	BUD		Žlučové kyseliny	gelová zk.	sérum	nutné 10-12 hodinové lačnění	neuveveno	7d	3m

			<b>LIPIDOVY SOUBOR (krev)</b>						
51	HAD		Lp(a)	gelová zk.	sérum	nutné 12 hodinové lačnění	24 h	15 d	12t
166	HAD		Apo A1	gelová zk.	sérum		1d	3d	24t
167	HAD		Apo B	gelová zk.	sérum		1d	3d	24t
215	HAD		Homocystein	K3EDTA	plasma	separace do 1 hodiny po odběru nebo transport v ledové tříšti. V Ae Plzeň je nutné plasmu zamrazit a posílat na Hadovku mraženou	nestabilní	24 h	13 t
6035	BUD		Fruktosamin	gelová zk.	sérum		3d	2t	2m
			<b>DIABETOLOGIE (krev)</b>						
499	Unilabs Plzeň		Laktát	NaF	plasma	Odběr po 30 min klidu z nezaškrčené paže	Odběr výhradně v OM Nepomucká ,extrémně nestabilní	1 hod	-
465	HAD imunologie	anti-GAD	Protilátky proti dekarboxylase kys. glutamové	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, chladit	4h	2d	12m
466	HAD imunologie	anti-IA-2	Protilátky proti tyrosin fosfatase	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, chladit	4h	2d	12m
1303	HAD imunologie	anti-IAA	Protilátky proti insulinu	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, chladit	4h	2d	1m

6030	Imunologie AE Brno	anti-ICA	Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, chladiť	4h	2d	12t
			<b>PROTEINY (krev)</b>						
248	HAD		S-ELFO bílkovin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
493	HAD		Imunofixace	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
6020	HAD		FLC ( vol. lehké řetězce)	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
529	BUD		Prealbumin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
6033	Unilabs Mostiště		Interleukin 6	gelová zk.	sérum	V laboratoři AE Plzeň je nutné Interleukin před transportem do Mostiště zamrazit a posílat mražený	5h	1d	12t
1307	HAD imunologie	A-CCP	Anti- Cyklický citrulinový peptid	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
*220	HAD imunologie		Podtřídy IgG1-IgG4	gelová zk.	sérum		1d	1t	12 t
*221	HAD imunologie		Podtřídy IgA1-IgA2	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
476	HAD imunologie	ECP	Eosinofilní kationický protein	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
434	HAD imunologie		C3- komplement	gelová zk.	sérum		-	1t	12t
435	HAD imunologie		C4- komplement	gelová zk.	sérum		-	1t	12t
475	Imunologie Unilabs Brno		C1-Inhibitor	gelová zk.	sérum		1d	1t	12 t
6028	VFN Praha		MBL	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
473	HAD imunologie		CIK-PEG	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
6029	Imunologie Unilabs Brno		CIK-C1q	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
395	BUD		Alfa-1-Antitrypsin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
439	BUD		Ceruloplasmin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
543	BUD		Haptoglobin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
518	BUD		Orosomukoid	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
6034	BUD		a-2-makroglobulin	gelová zk.	sérum		1d	1t	12t
			<b>METABOLISMUS ŽELEZA (krev)</b>						

6016	FN Plzeň ÚKBH	sTfR	Solubilní transferinový receptor	gelová zk.	sérum		3d	1t	2t
			<b>KARDIOMARKERY (krev)</b>						
6441	HAD		CK-MB mass	gelová zk.	sérum		4h	8h	12t
			<b>OSTEOMARKERY (krev)</b>						
477	HAD	S-CTX	beta-CrossLaps	gelová zk.	sérum		6h	8h	12t
524	HAD	PTH	Parathormon	gelová zk.	sérum	Separace do 2 hodin po odběru nebo transport do laboratoře na tajícím ledu, na Hadovku zasílat při teplotě 2-8 st. Celsia	nestabilní	48 hod	6m
520	HAD		Osteokalcin	gelová zk.	sérum		4h	1d	1r
160	HAD		25OH vitamínD	gelová zk.	sérum		8h	4d	4t
9004	HAD	S-P1NP	N-terminální propeptid prokol.	gelová zk.	sérum		24h	5d	4t
			<b>SPECIÁLNÍ VYŠETŘENÍ KREV</b>						
			ABR		neprovádíme				
			<b>ENDOKRINOLOGIE (krev)</b>						
416	HAD	anti-TSH	anti -TSH	gelová zk.	sérum		0	6d	4t
6031	Unilabs Louny	TBG	Tyroxin-binding globulin	gelová zk.	sérum		7d	14d	14d
217	HAD		Estradiol	gelová zk.	gelová zk.		1d	7d	3m
200	HAD		Progesteron	gelová zk.	sérum		neudáno	10d	6m
6032	BUD	sFLT-1/PIGF	Poměr Solubilního receptoru tyrosinkinasového typu I a Placentárního růstového faktoru	gelová zk.	sérum		neudáno	2d	6m
	HAD	DHEAS	Dehydroepinandrosteronsulfát	gelová zk.	sérum				
3204	Unilabs Ostrava		Testosteron volný	gelová zk.	sérum		1d	1t	24t
468	HAD	S-SHBG	Sex hormon binding globulin	gelová zk.	sérum		neudáno	3d	4t
202	HAD	FAI index	Index volného testosteronu	gelová zk.	sérum	odebírání se současně testosteron a SHBG	-	-	-

64, 601	BUD		P-Aldosteron klid, zátěž	gelová zk.	sérum		7 dní	5d	1r
566	BUD	ACTH	P-Adrenokortikotropní hormon	K3EDTA	plasma	separace do 2 hodin po odběru, transport v ledové tříšti, separovanou plasmu posílat zamraženou	nestabilní		3m
62, 601	BUD		P-Renin klid, zátěž	K3EDTA	plasma	separace do 2 hodin po odběru, separovaná plasmu posílat zamraženou	nestabilní		4t
			<b>ENDOKRINOLOGIE (sliny)</b>						
6040	BUD		Kortisol sliny	speciální odběrová souprava	sliny	pacient 2 minuty žvýká houbičku	neudáno	5d	neudáno
			<b>TUMORMARKERY (krev)</b>						
3215	HAD	p2PSA(PHI)	Index zdravé prostaty	gelová zk.	sérum	výpočet ze 3 hodnot:	neudáno	1d	5m
	HAD	Ca 125	Ca 125	gelová zk.	sérum		-	5d	-
701	HAD	S-HE4	Human epididimal protein	gelová zk.	sérum		neuveďeno		
6000	HAD		ROMA 1, ROMA 2 index	gelová zk.	sérum	poměr HE4 a Ca 125, nabrat současně			
212	HAD	CA 15-3	CA 15-3	gelová zk.	sérum		-	7d	-
487	HAD	CA 72-4	CA 72-4	gelová zk.	sérum		-	30d	-
478	HAD	NSE	Neurospecifická enoláza	gelová zk.	sérum		-	5d	-
479	HAD	CYFRA 21-1	Cytokeratinový fragment	gelová zk.	sérum		-	30d	-
159	BUD	S-S100	Protein S-100	gelová zk.	sérum		-	2d	-
179	HAD		Beta-2-mikroglobulin	gelová zk.	sérum		1d	3d	12t

6047	FN PLZEŇ OID		Kalcitonin	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4 -20 st.C	4h	1d	3m
571	FN PLZEŇ OID	TK	Thymidinkináza	gelová zk.	sérum	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4 -20 st.C	4h	1d	3m
6048	BUD		SCC-antigen	gelová zk.	sérum		-	24h	24t
			<b>RANNÍ MOČ</b>						
15	BUD		Osmolalita	zkum. na moč	r. moč		-	2d	-
6018	HAD		U-ELFO bílkovin	zkum. na moč	r. moč		-	1t	nemrazit
6019	HAD		U-Imunofixace	zkum. na moč	r. moč		-	1 t	30 d
6020	HAD	FLC	U-Volné lehké řetězce	zkum. na moč	r. moč		8 h	72 h	-
			<b>SBÍRANÁ MOČ</b>						
449	HAD		Kortisol v moči	zkum. na moč	sbír. moč		4h	2d	2r
6041	BUD		Aldosteron	zkum. na moč	sbír. moč		8 h	24 h	6 t
			<b>TOXIKOLOGIE ( MOČ )</b>						
245	HAD		Drogy screening	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
6038	BUD		Etanol	zkum. na moč	moč		1h	2d	dlouhodobě
242	HAD		Kanabinoidy ( marihuana)	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
243	HAD		Opiáty (morfin, heroin)	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
240	HAD		Amfetamin	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
6036	BUD		Buprenorfin	zkum. na moč	moč		1d	14 d	dlouhodobě
246	HAD		Benzodiazepiny	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
241	HAD		Kokain metabolity	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
3027	HAD		Barbituráty	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
6039	BUD		Etylglukoronid	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
6049	Unilabs BRNO	PCP	Fencyklidin	zkum. na moč	moč		1d	2d	dlouhodobě
			<b>TOXIKOLOGIE, LÉKY ( krev )</b>						
412	BUD		Etanol	gelová zk.	sérum	dezinfekce bez obsahu alkoholu!	-	20t (dokonalé uzavření)	-
3201	BUD		Fenytoin	gelová zk.	sérum		-	4d	-
3202	BUD		Karbamazepin	gelová zk.	sérum		-	7d	-
506	BUD		Lithium	gelová zk.	sérum		-	7d	-

6042	FN Plzeň ÚKBH		Teofylin	gelová zk.	sérum		1d	1t	3m
545	BUD		Valproát	gelová zk.	sérum		-	7d	-
3200	BUD		Lamotrigin	gelová zk.	sérum		-	7d	-
			<b>HEMATOLOGIE (krev)</b>						
6046	HAD		FW (ESR)	K3EDTA	krev		4h	-	-
			<b>IMUNOHEMATOLOGIE (krev)</b>						
169	BUD		Krevní skupina průvodka AeskuLab	K2EDTA	krev		5h	7d	-
394	BUD		Screening protilátek	K2EDTA	krev		-	7d	-
			<b>PCR- HUMÁNNÍ GENOM (krev)</b>			<b>Není součástí interní žádanky, nutno poslat originální žádanku</b>			
1577	Genetika Unilabs Brno		Trombofilní mutace (Leiden)	K3EDTA	krev	stačí 1 zkumavka na KO, výsledky většinou do 10 dnů, Lupénka a HLA-B27 do 20 dnů	-	7d	-
1578	Genetika Unilabs Brno		Trombofilní mutace (Protrombin)	K3EDTA	krev		-	7d	-
6003	Genetika Unilabs Brno		HLA B 27 (Konfirmace)	K3EDTA	krev		-	7d	-
1008	Genetika Unilabs Brno		Celiakie - HLA II ( DQ2/DQ8)	K3EDTA	krev		-	7d	-
8068	Genetika Unilabs Brno		Laktosová intolerance	K3EDTA	krev		-	7d	-
6068	Genetika Unilabs Brno		Histaminová tolerance	K3EDTA	krev		-	7d	-
6069	Genetika Unilabs Brno		Crohnova choroba	K3EDTA	krev		-	7d	-
6071	Genetika Unilabs Brno		Psoriáza	K3EDTA	krev		-	7d	-
6070	Genetika Unilabs Brno		Gilbertův syndrom	K3EDTA	krev		-	7d	-
6072	Genetika Unilabs Brno		Metabolismus thiopurinů	K3EDTA	krev	-	7d	-	
			<b>TĚHOTENSKÝ SCREENING (krev)</b>						
907	HAD		1.trimestr PAPP-a, f-beta HCG	gelová zk.	sérum		-	8d	1r
909	BUD		1.trimestr PIGF	gelová zk.	sérum		-	2d	-
908	HAD		2.trimestr AFP, HCG, Estriol volný	gelová zk.	sérum			3d	1r
			<b>INFEKČNÍ SEROLOGIE (krev)</b>						
258	HAD		anti-HAV IgM	gelová zk.	sérum		-	7d	-
257	HAD		anti-HAV total	gelová zk.	sérum		-	7d	-

253	HAD		HBeAg	gelová zk.	sérum		-	7d	-
254	HAD		anti-HBe	gelová zk.	sérum		-	7d	-
256	HAD		anti- HBc IgM	gelová zk.	sérum		-	7d	-
255	HAD		anti- HBc total	gelová zk.	sérum		-	7d	-
259	HAD		anti - HCV	gelová zk.	sérum		-	7d	-
*222	HAD imunologie		anti - HEV	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
6045	mikrobiologie		HCV - RNA	gelová zk.	sérum		6h	7d	6t
261	HAD		Syfilis	gelová zk.	sérum		-	7d	-
188	HAD		IM-test Paul-Bunnuell	gelová zk.	sérum		-	2d	-
			<b>KOAGULACE (Krev)</b>						
340	HAD		P-Trombinový čas	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 1 hodiny po odběru, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t
419	BUD		P-Antitrombin	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 2 hodin po odběru, do Prahy posílat zamraženou plasmu	4 h	nesmí se chladit	4t
410	HAD		P-Anti-Xa aktivita	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 2 hodin po odběru, odběr 4 hodiny po aplikaci léku, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	6 h	nesmí se chladit	4 t
341	BUD		P-ProC Global	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 2 hodin po odběru, odběr 4 hodiny po aplikaci léku, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t
342	BUD		Protein C	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 2 hodin po odběru, odběr 4 hodiny po aplikaci léku, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t



343	BUD		Protein S	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 2 hodin po odběru, odběr 4 hodiny po aplikaci léku, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t
344	BUD		Faktor VIII	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 1 hodiny po odběru, do Prahy posílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t
6074	HAD		Dabigatran	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 1 hodiny po odběru, na Hadovku posílat mražené	4h	nesmí se chladit	4t
6075	HAD		Rivaroxaban	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 1 hodiny po odběru, na Hadovku zasílat zamraženou plasmu	4h	nesmí se chladit	4t
6076	HAD		Apixaban	Na <sub>3</sub> -citrát	plasma	separace do 1 hodiny po odběru, na Hadovku posílat mražené	4h	nesmí se chladit	4t
<b>Žádanka druhá strana</b>									
			<b>HERPETICKÉ VIRY ( Krev)</b>						
1003	HAD imunologie		EBV (VCA, EBNA, EA)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1004	HAD imunologie		EBV – BLOT	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
			IM test	gelová zk.	sérum				
			IM test (heterofil.Ab)	gelová zk.	sérum				
1015	HAD imunologie		CMV	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1016	HAD imunologie		CMV – BLOT	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1017	HAD imunologie		HSV 1/2	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1018	HAD imunologie		HSV 1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1556	HAD imunologie		HSV 2	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1557	HAD imunologie		HSV – BLOT	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-

2522	HAD imunologie	HHV 6	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1022	HAD imunologie	VZV	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
<b>INFEKCE PŘENÁŠENÉ KLÍŠTATY A JINÉ ZOONOZY (krev)</b>							
1028	HAD imunologie	Borrelia burgdorferii sensu lato	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1027	HAD imunologie	Borrelia afzelii + garinii	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1068	vyšetření zrušeno	Borrelia burgdorferi sensu stricto	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1030	HAD imunologie	Borrelia při pozitivitě BLOT	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1026	HAD imunologie	Borrelia – BLOT (afzelii, garinii, sen	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1067	HAD imunologie	Ehrlichia (Anaplasma phagoc.) – BL	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1024	HAD imunologie	Klíšťová encefalitida (TBEV)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
711	HAD imunologie	Toxoplasma gondii	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1061	HAD imunologie	Brucella abortus	gelová zk.	sérum	-	7d	-
1064	Brno	Francisella tularensis	gelová zk.	sérum	-	7d	-
1065	Brno	Listeria monocytogenes	gelová zk.	sérum	-	7d	-
1066	Brno	Toxocara canis	gelová zk.	sérum	-	7d	-
<b>RESPIRAČNÍ INFEKCE (krev)</b>							
1095	HAD imunologie	Bordetella pertussis toxin	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1096	HAD imunologie	Bordetella pertussis – BLOT	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1099	HAD imunologie	Bordetella parapertussis	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1568	HAD imunologie	Chlamydie trachomatis	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1945	HAD imunologie	Chlamydie pneumoniae	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
997	HAD imunologie	Chlamydie – BLOT (pneum.+ trach.	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1058	HAD imunologie	Mycoplasma pneumoniae	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
9205	HAD imunologie	Mycoplasma pneumoniae – BLOT	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
2532	Imunologie Unilabs Ostrava	Adenoviry	gelová zk.	sérum	-	7d	-
704	HAD imunologie	Coxsackie viry A, B	gelová zk.	sérum	-	7d	-
708	Imunologie Unilabs Ostrava	Influenza A, B	gelová zk.	sérum	-	7d	-
702	Imunologie Unilabs Ostrava	Parainfluenza 1-4	gelová zk.	sérum	-	7d	-
1062	HAD imunologie	Legionella pneumoniae	gelová zk.	sérum	-	7d	-
703	Imunologie Unilabs Ostrava	RS virus	gelová zk.	sérum	-	7d	-
9495	HAD imunologie	SARS-CoV-2 (Spike protein)	gelová zk.	sérum	-	7-14d	-

		<b>SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE (krev)</b>							
1568	HAD imunologie	Chlamydie trachomatis	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1102	HAD imunologie	Mycoplasma hominis	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1134	HAD imunologie	Ureaplasma urealyticum	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
		<b>GASTROINFEKCE Ab ( krev)</b>							
1063	Imunologie Unilabs Ostrava	Campylobacter – BLOT	gelová zk.	sérum					
1947	HAD imunologie	Helicobacter pylori	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
3004	HAD imunologie	Helicobacter pylori – BLOT	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1586	HAD imunologie	Helicobacter pylori antigen – stolice	sterilní nádobka na moč	stolice		72 h	-	-	
1946	HAD imunologie	Yersinia	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
		<b>OSTATNÍ STANOVENÍ (krev)</b>							
9913	Imunologie Unilabs Ostrava	Candida albicans	gelová zk.	sérum		-	7d	-	
510	HAD imunologie	Morbilli	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
525	HAD imunologie	Parotitida	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1163	HAD imunologie	Parvovirus B19 – BLOT	gelová zk.	sérum					
1140	HAD imunologie	Rubeola	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1948	HAD imunologie	TORCH (Toxo, Rubeola, CMV, HSV)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1950	Mikrob. Unilabs Ostrava	TBC – Quantiferon	speciální odběrová souprava	plná krev	soupravu a návod na odběr lze vyžádat v lab.	16h!	nelze	nelze	
		<b>POSTVAKCINAČNÍ PROTILÁTKY Ab ( krev)</b>							
1024	HAD imunologie	Klíšťová encefalitida (TBEV) IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1176	HAD imunologie	Tetanus IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
9459	HAD imunologie	Morbilli IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
9446	HAD imunologie	Parotitida IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
9140	HAD imunologie	Rubeola IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1020	HAD imunologie	VZV IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
9495	HAD imunologie	SARS-CoV-2 (Spike protein) IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1095	HAD imunologie	Bordetella pertussis toxin IgG	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-	
1103	Imunologie Unilabs Ostrava	Haemophilus influenzae typ B (Hib)	gelová zk.	sérum					

1104	HAD imunologie	Streptococcus pneumoniae IgG	gelová zk.	sérum				
		<b>AUTOPROTILÁTKY ZÁKLADNÍ Ab ( krev)</b>						
1201	HAD imunologie	ANA IgG ( IF)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1203	HAD imunologie	ENA screening	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1204	HAD imunologie	Při pozitivě ANA typizace ANA /EN	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1208	HAD imunologie	ANA/ENA typizace – BLOT	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1222	HAD imunologie	ds DNA	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1224	HAD imunologie	Histony	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1223	HAD imunologie	Nukleozómy	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1214	Imunologie Unilabs Ostrava	Ro (SS/A)	gelová zk.	sérum	transport při pokojové teplotě	-	7-14 d	-
1216	Imunologie Unilabs Ostrava	La ( SS/B)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1049	Imunologie Unilabs Ostrava	Sm/U1 RNP	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1218	Imunologie Unilabs Ostrava	Scl-70	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1219	Imunologie Unilabs Ostrava	Jo-1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
6008	Imunologie Unilabs Ostrava	Centromera	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
6009	Imunologie Unilabs Ostrava	Myositida – BLOT	gelová zk.	sérum				7-14 d
		<b>ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDOM Ab (krev)</b>						
1288	HAD imunologie	Beta-2-glykoprotein (β2GPI)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1284	HAD imunologie	Kardiolipin (ACLA)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1289	HAD imunologie	Fosfolipidy screen (APLA)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
*219	HAD imunologie	Fosfolipidy typizace (5 Ag)	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1291	HAD imunologie	Fosfatidyl serin	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1293	HAD imunologie	Fosfatidyl inositol	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1295	HAD imunologie	Kys. fosfatidová	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1299	HAD imunologie	Protrombin	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1302	HAD imunologie	Annexin	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
1291	HAD imunologie	Fosfatidyl serin/ PT komplex	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
		<b>VASCULITIDY A NEFROLOGIE Ab (krev)</b>						

1310	HAD imunologie		ANCA (MPO, PR3)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1311	HAD imunologie		ANCA typizace (MPO, PR3, BPI, katepsin, elastáza, laktoferin, lysozym)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1316	HAD imunologie		ANCA IF	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
6007	HAD imunologie		ANCA IF při pozitivě roztestovat	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1318	HAD imunologie		Bazální membrána glomerulů (GBM)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1317	HAD imunologie		Endotelie (AECA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>REVMATOLOGIE Ab (krev)</b>					
555	HAD imunologie		RF IgG, IgA, IgM	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
6005	HAD imunologie		Cyklický citrulinovaný peptid (CCP)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
431	HAD imunologie		COMP	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
6002	HAD imunologie		Mutovaný citrulinovaný vimentin (MCP)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>GASTROENTEROLOGIE, HEPATOPATIE Ab (krev)</b>					
			<b>Gastro panel</b>					
6011	HAD imunologie		(VF, APCA, tTG, ASCA, DGP)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>Jaterní panel</b>					
6012	HAD imunologie		(SLA, aktin, LKM, M2, LC1)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1244	HAD imunologie		Hladký sval (ASMA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
6013	Imunologie Unilabs Ostrava		Mikrosomy (LKM)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
6014	Imunologie Unilabs Ostrava		Mitochondrie (AMA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY (IBD) Ab ( krev)</b>					
6015	HAD imunologie		IBD PANEL (exokr. b. pankreatu, ASCA, AGC, ANCA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1243	HAD imunologie		Exokrinní buňky pankreatu	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1239	HAD imunologie		Parietální buňky (APCA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1242	HAD imunologie		Pohárkové buňky střeva (AGC)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1237	HAD imunologie		Sach. cerevisiae (ASCA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1238	HAD imunologie		Vnitřní faktor (VF)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
495	HAD imunologie		Kalprotektin	sterilní nádobka na moč	stolice			
			<b>CELIAKIE Ab (krev)</b>					
	HAD imunologie		Celiakie screen (DGP, tTG)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-

1230	HAD imunologie	tTG IgG, IgA	Tkáňová transglutamináza IgG, IgA	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
	HAD imunologie	tTG IgA	Tkáňová transglutamináza IgA	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1226	HAD imunologie	DGP	Gliadin deamidovaný (DGP)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1228	HAD imunologie	EMA	Endomyzium (EMA)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IgA, IgG ( krev)</b>					
1232	zrušeno		Kravné mléko	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
*217	zrušeno		Frakce mléka (Alpha laktalbumin,	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1225	zrušeno		Gliadin nativní	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1071	zrušeno		Ovalbumin	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1234	zrušeno		Sója	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>NEUROLOGIE Ab ( krev)</b>					
1272	HAD imunologie		Aquaporin – 4	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1265	HAD imunologie		Gangliosidy – BLOT	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1073	HAD imunologie		Neurologické paraneopl. syndromy – BLOT (Hu, Ri, Yo, CV2, Amph, Ma 1/2, SOX1, GAD65)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>REPRODUKCE Ab (krev)</b>					
1269	HAD imunologie		Laminin	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1283	HAD imunologie		Müllerian hormon (AMH)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1277	HAD imunologie		Ovaria	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1267	HAD imunologie		Spermie	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1268	HAD imunologie		Zóna pellucida	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
			<b>OSTATNÍ AUTOPROTILÁTKY ( krev)</b>					
1074	HAD imunologie		Kůra nadledvin	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1075	HAD imunologie		Kožní tkáň (bazální membrána. epidermis, desmosomy)	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1320	HAD imunologie		Myocard	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
1076	HAD imunologie		Příčně pruhovaný sval (StrMA)			-	7-14 d	-
			<b>BIOLOGICKÁ LÉČBA ( krev)</b>					
1077	Imunologie Unilabs Ostrava		Adalimumab (hladina + Ab)	gelová zk.	sérum	-	3d	-
1079	Imunologie Unilabs Ostrava		Etanercept (hladina + Ab)	gelová zk.	sérum	-	3d	-

1080	Imunologie Unilabs Ostrava		Infliximab (hladina + Ab)	gelová zk.	sérum		-	3d	-
			<b>IMUNOFENOTYPIZACE (krev)</b>						
1949	HAD imunologie		pro absolutní hodnoty KO+diff.	K3EDTA	krev	skladovat a transportovat při laboratorní teplotě	48 h	-	-
1511	HAD imunologie		CD 3/4/8	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1504	HAD imunologie		CD 3/4/8/19/NK	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1552	HAD imunologie		HLA B27 screening	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1549	HAD imunologie		CD 3/4/8 BAL (bronchoalveol. laváž)	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1526	HAD imunologie		CD 45 RA/45 RO	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1529	HAD imunologie		CD 20/23	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1531	HAD imunologie		CD 20/5 CD19/5 (screening BCLL)	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1519	HAD imunologie		CD 8/38	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1530	HAD imunologie		CD 25/CD 4 – T reg	K3EDTA	krev		48 h	-	-
1532	HAD imunologie		CD 57/CD 3	K3EDTA	krev		48 h	-	-
			<b>FUNKČNÍ TESTY (krev)</b>						
1554	HAD imunologie		Oxidativní vzplanutí – fagocytóza	heparin litný	krev	skladovat a transportovat při laboratorní teplotě	24 h	-	-
			<b>SPECIFICKÉ IGE (krev)</b>						
9652	HAD imunologie		Inhalační screen – AlaTOP	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9691	HAD imunologie		TOP roztestovat	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9706	HAD imunologie		Potravinový screen – Fp5	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9692	HAD imunologie		Fp5 roztestovat	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9707	HAD imunologie		Trávy – Gp1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9710	HAD imunologie		Plísňe – Mp1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9711	HAD imunologie		Stromy – Tp9	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9712	HAD imunologie		Byliny – Wp1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9752	HAD imunologie		Deramatoph. pteronyssimus – D1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9753	HAD imunologie		Deramatoph. farinae – D2	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9754	HAD imunologie		Kočka – E1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9078	HAD imunologie		Pes – E5	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9757	HAD imunologie		Vaječný bílek – F1	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9758	HAD imunologie		Kravské mléko – F2	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9766	HAD imunologie		Burský ořech – F13	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-
9760	HAD imunologie		Pšeničná mouka – F4	gelová zk.	sérum		-	7-14 d	-

9783	HAD imunologie		Gluten (lepek, gliadin) – F79	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
9792	HAD imunologie		Bojínek – G6	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
9799	HAD imunologie		Včela medonosná – I1	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
9800	HAD imunologie		Vosa obecná – I3	gelová zk.	sérum	-	7-14 d	-
9813	HAD imunologie		Bříza – T3	gelová zk.	sérum	-	7-14d	-
			<b>HISTAMINOVÁ INTOLERANCE (krev)</b>					
6442	Imunologie Unilabs Ostrava		DAO koncentrace	gelová zk.	sérum	-	7d	-
			<b>ALERGENY MULTIPLEX ( krev)</b>					
1069	Imunologie Unilabs Ostrava		ALEX	gelová zk.	sérum	-	7d	-
1070	zrušeno		ISAC	gelová zk.	sérum	-	7d	-