

 Laboratoř Plzeň Nepomucká 159a, 326 00, Plzeň	Stabilita analytu v biologickém materiálu	Kód dokumentu: F-102
		Schválil: MUDr. Tolarová Veronika vedoucí laboratoře a manažer kvality

Vyšetřovaný analyt	Stabilita při pokojové teplotě (po separaci)	Stabilita 2-8°C (po separaci)	Stabilita -20°C (po separaci)
AFP	8 hodin	3 dny	6 měsíců
Albumin	8 hodin	3 dny	3 měsíce
ALP	4 hodiny	3 dny	4 týdny
ALT	3 dny	1 týden	7 týdnů
Amyláza	1 týden	1 týden	1 rok
anti-HAV IgM	neuvedeno	1 týden	
anti-HBs	neuvedeno	1 týden	
anti-TG	8 hodin	1 týden	6 měsíců
anti-TPO	8 hodin	3 dny	6 měsíců
APTT	6 hodin	6 hodin	1 měsíc
ASLO	neuvedeno	2 dny	dlouhodobě
AST	4 dny	1 týden	12 týdnů
Bilirubin celkový	8 hodin	7 dnů (uložený v chladu a temnu)	dlouhodobě
Bilirubin konjug.	8 hodin	7 dnů (uložený v chladu a temnu)	dlouhodobě
Ca	1 týden	3 týdny	8 měsíců
CA 19-9	8 hodin	1 týden	6 měsíců
CEA	1 den	1 týden	1 rok
Celková bílkovina	6 dní	1 týden	dlouhodobě
CK	2 dny	1 týden	4 týdny
Cl	1 týden	1 týden	1 rok
C-peptid	3 hodiny	1 den	30 dní
CRP	4 hodiny	1 týden	3 roky
D-Dimer	4	1 den	1 měsíc
Digoxin	8 hodin	1 týden	dlouhodobě
Estradiol	8 hodin	2 dny	2 měsíce
Fe	7 hodin	3 týdny	
Ferritin	8 hodin	2 dny	1 rok
Folát	2 hodiny	1 den	1 měsíc
fPSA	neuvedeno	5 dní	3 měsíce
FSH	8 hodin	1 týden	1 rok
fT3	8 hodin	2 dny	6 měsíců
fT4	8 hodin	2 dny	6 měsíců
GGT	1 týden	1 týden	6 měsíců

 Laboratoř Plzeň Nepomucká 159a, 326 00, Plzeň	Stabilita analytu v biologickém materiálu	Kód dokumentu: F-102
		Schválil: MUDr. Tolarová Veronika vedoucí laboratoře a manažer kvality

Glukóza (sérum/plazma)	1 den	1 týden	1 rok
HBeAg	neuvedeno	1 týden	dlouhodobě
HBsAg	neuvedeno	1 týden	dlouhodobě
hCG	1 den	2 dny	1 rok
HDL cholesterol	2 dny	1 týden	2 týdny
HIV combo	neuvedeno	2 týdny	dlouhodobě
Cholesterol	2 dny	1 týden	3 měsíce
Cholinesteráza	2 dny	1 týden	2 týdny
IgA	8 hodin	1 týden	dlouhodobě
IgE	8 hodin	1 týden	dlouhodobě
IgG	8 hodin	1 týden	dlouhodobě
IgM	8 hodin	1 týden	dlouhodobě
K	1 týden	2 týdny	1 rok
Kortizol	8 hodin	2 dny	1 rok
Kreatinin	1 týden	1 týden	3 měsíce
Kyselina močová	3 dny	1 týden	1 rok
LDH	neuvedeno	3 dny	6 týdnů
LDL cholesterol	1 den	1 týden	
LH	8 hodin	2 dny	1 rok
Mg	1 týden	1 týden	1 rok
Močovina	7 dní	2 týdny	1 rok
Myoglobin	8 hodin	2 dny	4 týdny
Na	2 týdny	2 týdny	1 rok
NT-pro BNP	3 dny	8 dní	1 rok
P	2 dny	4 dny	1 rok
Prolaktin	1 den	2 dny	1 rok
Protrombinový čas	6 hodin	nestabilní	1 měsíc
PSA	neuvedeno	5 dní	6 měsíců
RF	neuvedeno	1 týden	3 měsíce
T3	8 hodin	2 dny	6 měsíců
T4	8 hodin	2 dny	6 měsíců
Testosteron	neuvedeno	1 týden	2 měsíce
Transferin	1 týden	1 týden	6 měsíců
Triacylglyceroly	2 dny	1 týden	dlouhodobě
Troponin I	8 hodin	1 den	40 dní
TSH	8 hodin	2 dny	6 měsíců

 Laboratoř Plzeň Nepomucká 159a, 326 00, Plzeň	Stabilita analytu v biologickém materiálu	Kód dokumentu: F-102
		Schválil: MUDr. Tolarová Veronika vedoucí laboratoře a manažer kvality

Vitamin B12 (aktivní)	16 hodin	3 dny	3 měsíce
Thyroglobulin	neuvedeno	3 dny	2 měsíce

Vyšetřovaný analyt (plná krev)	Stabilita při pokojové teplotě	Stabilita 2-8°C	Stabilita -20°C
HbA1c	3 dny	7 dní	neuvedena
Krevní obraz	5 hodin	neuvedena	neuvedena