

**TRICHOMONAS VAGINALIS / KVASINKY****C.A.T. swab**

---

**ODBĚR VZORKU**

Speciální kultivační médium s odběrovým tamponem (C.A.T. swab) je určeno pro vyšetření *Trichomonas vaginalis*, *Candida* sp. a dalších druhů kvasinek z urogenitálních vzorků. V případě podezření na infekci *Trichomonas vaginalis* rovněž doporučujeme zhotovit nátěr na sklíčko pro vyšetření MOP (mikrobiální obraz poševní).

1. Odběrovou soupravu vytemperujte na pokojovou teplotu.
2. Tamponem z odběrové soupravy proveďte výtěr:

**U ŽENY VAGINÁLNÍ SEKRET****U MUŽE URETRÁLNÍ nebo PROSTATICKÝ SEKRET**

3. Tampon s odebraným materiálem vložte do kultivačního média, přečnívající část zalomte ohnutím o okraj zkumavky a pevně uzavřete.

**UCHOVÁVÁNÍ VZORKU PŘED TRANSPORTEM, TRANSPORT**

Vzorek co nejrychleji po získání přepravit do laboratoře při pokojové teplotě, optimálně při 37 °C. Upozorněte řidiče svozové služby, že se vzorek nesmí chladit!