

**ÚKBH pavilon 10 ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE FN LOCHOTÍN**

 Telefonní číslo: Lochotín: příjem materiálu: 37 710 3271, výsledky: 37 710 4245

Bory: příjem materiálu: 37 740 2571

**Metody, které nejsou na žádance Unilabs**

Číslo metody	Lab	Zkratka	Analyt	Odběr	Podmínky transportu před separací	Stabilita po separaci (stabilita moči)		
						20°C	4-8°C	-20°C
<a href="#">ÚKBH</a>	EPO	S-Erythropoetin		gelová zk.	nerozmrazovat opak.	1d	1t	8t
<a href="#">ÚKBH</a>		B-Osm.resistence		K <sub>3</sub> EDTA	okamžitý transport	2h	6h	nelze mrazit
<a href="#">ÚKBH</a>		F-Elastasa ve stolici		sterilní nádobka	velikost hrášku			3d
<a href="#">ÚKBH</a>		U- Porfyriny celkové		čerst.moč	chránit před světlem	4d	1t	4t
<a href="#">ÚKBH</a>		S-Amiodaron		vyšetření dočasně pozastaveno, odesílat do VFN Praha		4h	3d	2t
<a href="#">ÚKBH</a>		S-Fenobarbital		gelová zk.		4d	4t	2r
<a href="#">ÚKBH</a>		P-Takrolimus		K <sub>3</sub> EDTA				8d
<a href="#">ÚKBH</a>		S-Levetiracetam		gelová zkumavka				7d
<a href="#">ÚKBH</a>		P-Lupus antikoagulans		Na <sub>3</sub> -citrát	separace do 1 hodiny po odběru, vyšetření pouze s řádně vyplněnou speciální žádankou FN	4h		nesmí se chladit 4t
<a href="#">ÚKBH</a>	APCR	P-APC resistance		Na <sub>3</sub> -citrát	separace do 1 hodiny po odběru	4h		nesmí se chladit 4t
<a href="#">ÚKBH</a>	CDT	S- Bezsacharidový transferin		gelová zk.		2d	1t	3m

**OID pavilon 3 ODDĚLENÍ IMUNOCHEMICKÉ DIAGNOSTIKY - FN - BORY**

Telefonní číslo příjem : 377402410

Kde je uvedeno transport v ledové tříšti, neseparovaný materiál transportovat v ledové tříšti, materiál po separaci okamžitý transport nebo zamrazit.

Číslo metody	Lab	Zkratka	Analyt	Odběr	Podmínky transportu před separací	Stabilita po separaci (stabilita moči)		
						20°C	4-8°C	-20°C
<b>Metody, které jsou na žádance Unilabs</b>								
	<a href="#">OID</a>		S-PHI (MUDr.Eret)	gelová zk.	výpočet ze 3 hodnot ( PSA, fPSa, Pro-PSA)	4h	1d	3m
6047	<a href="#">OID</a>		S- Kalcitonin	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4-20 st.C	4h	1d	3m
<b>Metody, které nejsou na žádance Unilabs</b>								
571	<a href="#">OID</a>	TK	S-Thymidinkinasa	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4-20 st.C	4h	1d	3m
	<a href="#">OID</a>	S-IGF	S-Insulin like Growth Factor I (Somatomedin)	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4-20 st.C	4h	1d	12t
	<a href="#">OID</a>	S-TPS	S-Tkáňový polypeptidový specifický Ag	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4-20 st.C	2h	1d	24t
	<a href="#">OID</a>	S-ICTP	S-Karboxyterminální telopeptid kolag.	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 4-20 st.C		5d	4t
	<a href="#">OID</a>	S-17-OH	S-17-OH- Hydroxyprogesteron	gelová zk	Odběr mezi 6-8 hodinou ranní, u žen ve folikulární fázi cyklu, 3 týdny před odběrem vysadit Spironolakton	6h	1d	1r
	<a href="#">OID</a>		P- Metanefrin, Normetanefrin	K3EDTA	Odběr po 30 minutách vleže, 4 hodiny před odběrem nejíst, nepít, nekouřit. 14 dní před odběrem vysadit antidepressiva a antihypertenziva. Separace do 2 hodin po odběru, na zkumavku napsat "PLASMA", transport plasmu v ledové tříšti do laboratoře nebo rovnou do FN (Tylovka)	2h	1d	6 m
	<a href="#">OID</a>		S- Chromogranin A	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru	4h	24h	2m
	<a href="#">OID</a>	S-hGH	S-Růstový,somatotropní hormon	gelová zk.	separace do 2 hodin po odběru	4h	24h	3m

**ÚIA ÚSTAV ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE FN LOCHOTÍN telefon: 377 103 395**

Číslo metody	Lab	Zkratka	Analyt	Odběr	Podmínky transportu před separací	Stabilita po separaci (stabilita moči)		
						20°C	4-8°C	-20°C

**Metody, které nejsou na žádance Unilabs**

<a href="#">ÚIA</a>	spec. IGE PROFESNÍ ALERGENY ( Profesní astma)			
<a href="#">ÚIA</a>	k75 Isokyanát TDI ( toluendiisokyanát)	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	k76 Isokyanát MDI ( difenylmetandiisokyanát)	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	k77 Isokyanát HDI ( hexametyldiisokyanát)	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	k78 Etylenoxid	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	k80 Formaldehyd	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	k87 Alfa-Amylasy	gelová zk.	7d	6m
<a href="#">ÚIA</a>	Chladové protilátky ( Kryoglobuliny)			

Odběr prováděn v imunologické ambulanci FN

**TS**

**TRANSFUSNÍ STANICE FN BORY**

**telefon: 377 402 813**

Nemrazit, pouze chladit, okamžitý transport

Stabilita po separaci  
(stabilita moči)

Číslo metody	Lab	Zkratka	Analyt	Odběr	Podmínky transportu před separací	20°C	4-8°C	-20°C
<b>Zasíláme vzorky se žádankou Transfuzní stanice FN Plzeň</b>								
<a href="#">TS</a>			Krevní skupina těhotné s průvodkou TS	K2EDTA růžová		12h	8h	0h
<a href="#">TS</a>			Protilátky proti trombocytům	K2EDTA růžová		12h	8h	0h
<a href="#">TS</a>			Coombs přímý, nepřímý	K2EDTA růžová		12h	8h	0h

**GEN**

**GENETIKA Plzeň**

Stabilita po separaci  
(stabilita moči)

Číslo metody	Lab	Zkratka	Analyt	Odběr	Podmínky transportu před separací	20°C	4-8°C	-20°C
<b>Zasíláme vzorky se žádankou Genetiky Plzeň</b>								
	GEN		Prenatální screening	gelová zkumavka		3d		1r







