

**MOČ KULTIVAČNĚ****URICULT**

---

**ODBĚR VZORKU**

Uricult zachovává původní hladinu mikrobiální koncentrace vzorku. Podmínkou správné interpretace Uricultu je jeho správné naočkování.

1. Odšroubujte víčko z Uricultu bez toho, abyste se dotkli povrchu agaru.
2. Držte Uricult za víčko, **ponořte** destičku s kultivačními ploškami **do sterilní nádoby se vzorkem právě odebrané moči** tak, že je povrch agaru na obou stranách nosiče úplně ponořen. Jestliže tento postup objem moče nedovoluje, můžete povrch agaru močí polít. **UJISTĚTE SE, ŽE JE CELÝ POVRCH AGARU NA OBOU STRANÁCH NAMOČEN.** V žádném případě se nedotýkejte kultivačních plošek!
3. Nadbytečnou moč nechejte z agaru dobře odkapat. **POKUD JE V NÁDOBCE URICULTU KAPALINA, JE NUTNÉ JI PŘED UZAVŘENÍM VYLÍT.** Destičku zašroubujte zpět do nádoby.

**UCHOVÁVÁNÍ VZORKU PŘED TRANSPORTEM, TRANSPORT**

Uricult po naočkování odešlete ke kultivaci do laboratoře. Uchovávání i transport při pokojové teplotě.