

Klasifikace:

VEŘEJNÉ

ID dokumentu:

P-016_MIK

Materiál	Odběrová nádobka	Uchování (pouze pokud není možný okamžitý transport do laboratoře)	Transport
		Čas/Teplota	Teplota
Výtěry v transportním médiu	zkumavka s transportní půdou	24 hod/15-25°C	15-25°C
Moč, moč na urogenitální mykoplazmata	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	2-15°C
Sputum, BAL, Bronchoalveolární aspirát	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	15-25°C
Ejakulát, prostatický sekret	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/15-25°C	15-25°C
Hnis, punktát, ascites, dialyzát, atd.	sterilní kontejner s červeným víčkem nebo injekční stříkačka	24 hod/15-25°C	15-25°C
Cizorodý materiál (cévní katetry, drén, kanyla, intrauterinní tělísko)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	15-25°C
<i>Trichomonas vaginalis</i> (urogenitální výtěr)	odběrová nádobka C.A.T. swab	24 hod/37°C nesmí se chladit!	15-25°C, optimálně 37°C
Stolice rotavirus, adenovirus, norovirus, astrovirus (Ag)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	15-25°C
Stolice - <i>Clostridium difficile</i> (toxiny, Ag)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	15-25°C
MOP	mikroskopické podložní sklíčko	72 hod/15-25°C	15-25°C
Urogenitální mykoplazmata (urogenitální výtěr)	odběrová nádobka UMMt	24 hod/15-25°C	15-25°C
Krev (hemokultury) a primárně sterilní tekutiny	hemokultivační lahvičky BacT/ALERT	24 hod/15-25°C nesmí se chladit!	15-25°C
Výtěr nosohltan - PCR Multiplex Respirační patogeny (výter krk, nosohltan, nasofaryngeální aspirát, tracheální aspirát, výplach z bronchů, BAL)	Eswab-souprava, sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8°C	2-15°C
Výtěr nosohltan SARS-CoV-2	OS NodFord bílé víčko Corotest IVTM	24 hod/2-8°C	2-15°C
Sliny SARS-CoV-2	Tamponek Salivette®	24 hod/2-8°C	2-15°C
PCR Multiplex STD (výter uretra, cervix, vagína, oko)	cobas® PCR Media Dual Swab	24 hod/2-8°C	2-15°C

PCR Multiplex STD (prost. sekret, ejakulát, moč)	sterilní kontejner s červeným víčkem, cobas® PCR Media Dual Swab Sample Packet	24 hod/2-8°C	2-15°C
PCR Multiplex - Gastrointestinální viry (stolice)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - paraziti	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - helminti	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - gastrointestinální patogény	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - Influenza(A,B), RSV, SARS-CoV-2 (výter krk, nosohltan, nasofaryngeální aspirát, tracheální aspirát, výplach z bronchů, BAL)	Eswab-souprava, sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR HBV-DNA (krev)	zkumavka s K3EDTA	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR HCV-RNA (krev)	zkumavka s K3EDTA	24 hod. / 2-8°C	2-8°C