

Klasifikace:
VEŘEJNÉ
ID dokumentu:
P-016_MIK

Materiál	Odběrová nádobka	Uchování (pouze pokud není možný okamžitý transport do laboratoře)	Transport
		Čas/Teplota	Teplota
Výtěry v transportním médiu	zkumavka s transportní půdou	24 hod/15-25 °C	15-25 °C
Moč, moč na urogenitální mykoplazmata	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	2-15 °C
Sputum, BAL, Bronchoalveolární aspirát	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	15-25 °C
Ejakulát, prostatický sekret	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/15-25 °C	15-25 °C
Hnis, punktát, ascites, dialyzát, atd.	sterilní kontejner s červeným víčkem nebo injekční stříkačka	24 hod/15-25 °C	15-25 °C
Cizorodý materiál (cévní katetry, drén, kanyla, intrauterinní tělísko)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	15-25 °C
Vzorek biopsie žaludeční sliznice (vyšetření <i>H. pylori</i>)	sterilní zkumavka se sterilním fyziologickým roztokem, obsah 2/1,5 ml	24 hod/15-25 °C	15-25 °C
<i>Trichomonas vaginalis</i> (urogenitální výtěr)	odběrová nádobka C.A.T. swab souprava na trichomonády a kvasinky	24 hod/37 °C nesmí se chladit!	15-25 °C, optimálně 37 °C
Stolice rotavirus, adenovirus, norovirus, astrovirus, <i>H. pylori</i> (Ag)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	15-25 °C
Stolice - <i>Clostridium difficile</i> (toxiny, Ag)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	15-25 °C
MOP	mikroskopické podložní sklíčko	72 hod/15-25 °C	15-25 °C
Urogenitální mykoplazmata (urogenitální výtěr)	odběrová nádobka UMMt	24 hod/15-25 °C	15-25 °C
Krev (hemokultury) a primárně sterilní tekutiny	hemokultivační lahvičky BacT/ALERT	24 hod/15-25 °C nesmí se chladit!	15-25 °C
Výtěr nosohltan - PCR Multiplex Respirační patogeny (výter krk, nosohltan, nasofaryngeální aspirát, tracheální aspirát, výplach z bronchů, BAL)	Eswab-souprava, sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod/2-8 °C	2-15 °C
Výtěr nosohltan SARS-CoV-2	OS NodFord bílé víčko Corotest IVTM	24 hod/2-8 °C	2-15 °C

Sliny SARS-CoV-2	Tamponek Salivette®	24 hod/2-8°C	2-15°C
PCR Multiplex STD (výtěr uretra, cervix, vagína, oko)	cobas® PCR Media Dual Swab	24 hod/2-8°C	2-15°C
PCR Multiplex STD (prost. sekret, ejakulát, moč)	sterilní kontejner s červeným víčkem, cobas® PCR Media Dual Swab Sample Packet	24 hod/2-8°C	2-15°C
PCR Multiplex - Gastrointestinální viry (stolice)	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - paraziti	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - helminti	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - gastrointestinální patogény	sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR Multiplex - Influenza(A,B), RSV, SARS-CoV-2 (výtěr krk, nosohltan, nasofaryngeální aspirát, tracheální aspirát, výplach z bronchů, BAL)	Eswab-souprava,-sterilní kontejner s červeným víčkem	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR HBV-DNA (krev)	zkumavka s K3EDTA	24 hod. / 2-8°C	2-8°C
PCR HCV-RNA (krev)	zkumavka s K3EDTA	24 hod. / 2-8°C	2-8°C